

Instruktion ekologiskt bäddstöd



Bäddstöd med tillbehör. (filt, band) Välj storlek på bäddstöd efter barnets vikt.



Placera barnet med stjärten långt ner i fotändan på stödet. Ryggen skall vila mot stödets kant.



Forma stödets huvudända efter hur barnet ligger.



Placera det lösa bandet under bäddstödet.



Använd bandet till att ge extra stöd och ev. skyla barnet från ljusinsläpp.



Filtens ger extra stöd och fyllnad om den stoppas innanför bäddstödet



Vid behov av andningshjälp vik bort ena fliken av huvudändan.



Vid olika vårdhandlingar tex. nålsättning och blöjbyte. Vik ned stödets fotända.



Vägning i bäddstödet.



Låt barnet ligga i bäddstödet vid röntgen. Tag bort det lösa bandet.



Vid intubation. Vik ned huvudändan låt barnets bröstorg vara synlig.